

Plasma Pen⁺

L'ultima generazione per i trattamenti al Plasma



Plasma Pen⁺

Il dispositivo Plasma Pen è una piattaforma multifunzione con quattro applicatori.

Il manipolo PLASMA SPOT con azioni ablativ e non ablativ e viene usato per la rimozione delle discromie cutanee, blefaroplastica non chirurgica, xantelasmi, verruche, acne, rimozione rughe, rimozione cicatrici atrofiche ed ipertrofiche, cheloidi, resurfacing ed asportazione dei fibromi cutanei.

Il manipolo PLASMA JET ha un azione antibatterica, purificante, antinfiammatoria e cheratolitica per migliorare la porazione transdermica di prodotti e farmaci specifici da effettuare con l'applicatore SONO ad ultrasuoni e l'applicatore EP con micro-correnti modulate.

Le modalità singola, continua e ripetuta con scelta della potenza erogata nell'emissione del Plasma si adatta al meglio per ogni esigenza.



Il dispositivo Plasma Pen è una piattaforma multifunzione con quattro applicatori.

Plasma Spot

Plasma per Blefaroplastica non chirurgica, Rimozione Rughe, Rimozione Fibromi, Cheloidi, Cheratosi, Cicatrici, Xantelasma, Discromie della pelle e Miglioramento dell'area Post Acneica

Plasma Jet

Plasma con funzione cheratolitica per la Rigenerazione cellulare, Lieve miglioramento delle rughe, Purificazione della superficie della pelle con azione antinfiammatoria.

Sono Porazione

Funzione di porazione ultrasonica per la veicolazione transdermica di prodotti e farmaci specifici con applicatore ad Ultrasuoni

EP Elettroporazione

Funzione di elettro veicolazione transdermica di prodotti e farmaci specifici attraverso un'azione di micro-correnti modulate

Plasma Spot

Il manipolo PLASMA SPOT è accessoriato da due tipi di aghi per trattamenti non ablativi ed ablativi.

Il primo, non ablativo da usare ad una distanza di 1mm dalla superficie della pelle è sterilizzabile con alcol.

Il secondo, ablativo e monouso, va inserito fino a 0,5mm sotto la pelle.




Ago Non Ablativo

- Trattamenti di Blefaroplastica non chirurgica
- Xantelasma
- Rimozione cicatrici ipertrofiche
- Trattamento acne lievi
- Rigenerazione della pelle



Ago Ablativo

- Asportazione fibromi cutanei
- Rimozione cicatrici atrofiche
- Trattamento acne severe
- Rigenerazione della pelle

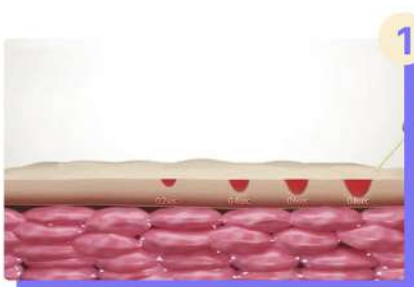


Emissione Spot Singolo

È possibile selezionare il tempo di rilascio dell'energia del plasma. Man mano che il "tempo" si allunga, la quantità totale di energia trasferita alla pelle aumenta.



Emissione Spot Pulsato

L'energia del plasma viene rilasciata con frequenza pulsata che aumentata viene trasferita più in profondità nella pelle.

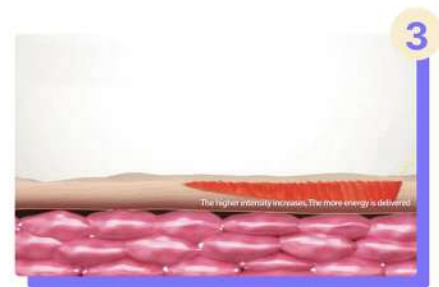

Emissione Spot Continuo

L'energia del plasma in emissione continua, fornisce un'applicazione più conveniente per i terapeuti avanzati e può essere utilizzata per rimuovere le cicatrici ed i fibromi cutanei.

Plasma Spot

L'applicatore PLASMA JET, con modalità Continua e Pulsata, ha una funzione cheratolitica per la Rigenerazione cellulare, Lieve miglioramento delle rughe, Purificazione della superficie della pelle ed azione antinfiammatoria.

La somma di queste azioni consentiranno una maggiore penetrazione nella veicolazione transdermica di prodotti e farmaci specifici da effettuare con gli applicatori (SONO) ad Ultrasuoni e/o (EP) a Micro-correnti modulate.



Jet Tip

- Funzione cheratolitica
- Rigenerazione cellulare
- Migliorazione delle rughe
- Purificazione superficie della pelle
- Azione antinfiammatoria



Emissione Continua





Emissione Pulsata

Sono Porazione

L'applicatore PLASMA JET, con modalità Continua e Pulsata, ha una funzione cheratolitica per la Rigenerazione cellulare, Lieve miglioramento delle rughe, Purificazione della superficie della pelle ed azione antinfiammatoria.



La somma di queste azioni consentiranno una maggiore penetrazione nella veicolazione transdermica di prodotti e farmaci specifici da effettuare con gli applicatori (SONO) ad Ultrasuoni e/o (EP) a Micro-correnti modulate.

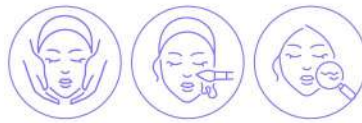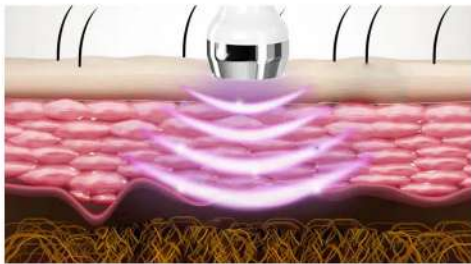

EP Elettroporazione

L'applicatore ad impulsi elettrici modulati, crea dei passaggi momentanei nello strato corneo della pelle in modo che i prodotti cosmetici ed i farmaci possano essere introdotti negli strati basali e del derma della pelle.

Il collagene, l'acido ialuronico ed altre sostanze possono essere efficacemente somministrate nella profondità della pelle, in modo rapido e indolore, senza l'uso di aghi, per effetti Anti Età, Idratanti, Nutrienti e Lifting.

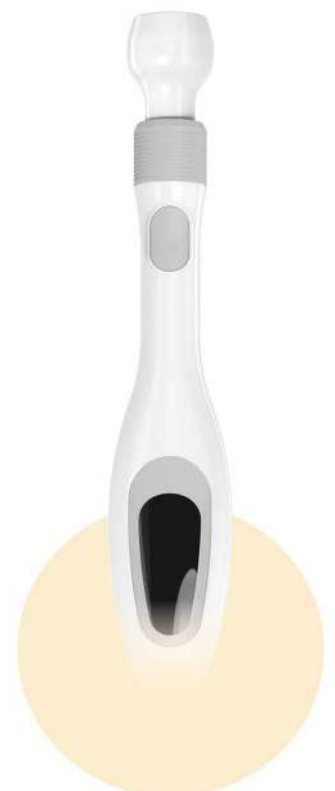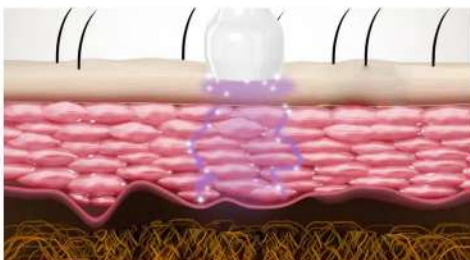

Scheda Tecnica

Frequenze - Programmi

Plasma Spot	100 kHz
-------------	---------

Plasma Jet	220 kHz
------------	---------

Sono	1 MHz
------	-------

EP	12-20 kHz
----	-----------

Modalità:	Continua / Pulsata / Singola
------------------	------------------------------

Protezione:	Classe I Tipo BF
--------------------	------------------

Certificato MDD CE:	MTIC 0068
----------------------------	-----------

Dimensioni	L 28 x P 30 x A 11 cm
-------------------	-----------------------

Dispositivo certificato 93/42 EEC registrato nel database dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute.



Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790

Mob. +39.333.6202998

suntechmedical.srl@gmail.com

info@suntechmedical.it